

# **Surtex<sup>®</sup> Classic Post**

## **Классические штифты Surtex<sup>®</sup>**

---

### ***КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОСТОТА***

**Металлические, пассивные внутриканальные штифты анатомической формы с обработанной поверхностью для обеспечения улучшенной ретенции**



Металлические штифты Surtex (PT) обладают анатомической формой и предназначены для пассивной фиксации внутри корневого канала зуба. Поверхность всех штифтов Surtex (PT) специально обработана для достижения усиленной ретенции и для надежного выполнения функции штифта по удержанию.

Штифты Surtex (PT) выпускаются из различных металлов: биологически совместимого с тканями зуба титана, позолоченной латуни или из специальной нержавеющей стали повышенной прочности.

Головка штифта Surtex (PT) - квадратная с поперечными разрезами, которая может по необходимости разгибаться под нужными углами в зависимости от предполагаемой эстетичной формы культи коронковой части зуба.


## ШТИФТ SURTEX:

- на 200% улучшенная ретенция
- поверхность готова к фиксации и не требует пескоструйной обработки
- специальное покрытие имеет превосходную адгезию к бондам и фиксирующим материалам
- практически не просвечивается через зубные ткани и десну за счет специального покрытия, которое снижает коэффициент отражения света, отлично маскируется эстетическим композитным материалом без использования красок и опакowych оттенков
- анатомической формы и используется для пассивного размещения в канале



## НАБОР штифтов SURTEX

Штифты Surtex выпускаются в полном ассортименте размеров с соответствующими развертками и аксессуарами или отдельными упаковками по 12 штук в упаковке. Наборы находятся в специальной коробочке с прозрачной крышечкой, которая вращается на 360° и имеет встроенную шкалу для замеров. В процессе расходования можно пополнять набор отдельными компонентами.

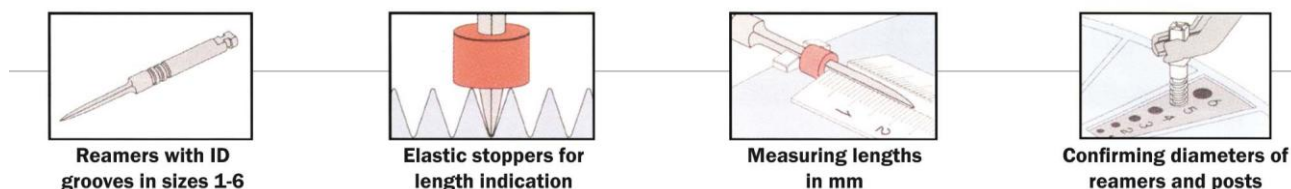

Развертки со специальной маркировкой от 1 до 6 размера (развертки типа PRA, Helix Classic RSA,RSB,RSC)  
Эластичный, передвижной стопор для индикации необходимой рабочей длины  
Установка стопора на нужную рабочую длину в мм.  
Контроль соответствия диаметров выбранной развертки и штифта

## РАЗМЕРЫ ШТИФТОВ Surtex® Classic Post

(титановые, позолоченные и из нержавеющей стали)

КОРОТКИЕ (7,8 ММ)	СРЕДНИЕ (9,3 ММ)	ДЛИННЫЕ (11,8 ММ)	ЭКСТРА ДЛИННЫЕ (14,2 ММ)	СУПЕР ДЛИННЫЕ (17 ММ)
Ø 1,05 мм	Ø 1,05 мм	Ø 1,05 мм		
Ø 1,20 мм	Ø 1,20 мм	Ø 1,20 мм		
Ø 1,35 мм	Ø 1,35 мм	Ø 1,35 мм	Ø 1,35 мм	Ø 1,35 мм
Ø 1,50 мм	Ø 1,50 мм	Ø 1,50 мм	Ø 1,50 мм	Ø 1,50 мм
Ø 1,65 мм	Ø 1,65 мм	Ø 1,65 мм	Ø 1,65 мм	Ø 1,65 мм
Ø 1,80 мм	Ø 1,80 мм	Ø 1,80 мм	Ø 1,80 мм	Ø 1,80 мм

Dentatus AB, Индекс 8093, SE-163 08 Spånga, Швеция

Телефон +46-8-546 509 00, info@dentatus.se, www.dentatus.se

ООО «НеоТехМед», Россия, Санкт-Петербург, +7- 921-849 79 54, факс +7- 812-248 73 52

e-mail: info-ntm@yandex.ru, www.new-tm.ru