



КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ АНАТОМИЧЕСКОГО АРМИРУЮЩЕГО ШТИФТА

Стекловолоконные ленты DENTAPREG™, ипрегнированы в композитных смолах

1. Изолируйте рабочее поле стандартным способом. Приготовьте ленту с продольной укладкой стекловолокон SFU/PFU.

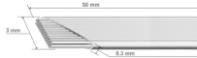

3. Замеряйте длину гибким штифтом длину свободного канала для установки штифта.

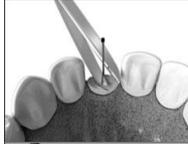


5. Проведите адгезивную подготовку полости канала стандартным способом с помощью адгезива.



7. Надрежьте защитную пленку, удерживая ленту с одной стороны, захватите пленку пинцетом и снимите ее с ленты.



9. Установите ленту в канал, не прилагая при этом больших усилий.

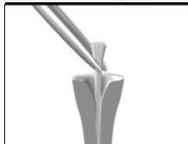

11. Нанесите на отвержденную ленту, фиксирующий композитный цемент.



13. Уберите излишки, фиксирующего композитного цемента.



2. Очистите канал от obturационного материала до дентина стандартным способом.




4. Протравите полость канала, смойте протравку и просушите поверхность.



6. Отмерьте и отрежьте нужную длину ленты SFU, PFU или PFUI.



8. Сложите или скрутите ленту по длине и срежьте один ее конец острыми ножницами под углом 45°.

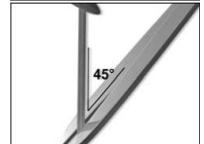

10. Извлеките аккуратно ленту из канала и отвердите светом, (40сек.), желательно с сохранением анатомических изгибов.



12. Внесите фиксирующий композитный цемент в канал и аккуратно установите ленту на место.



14. Отвердите светом фиксирующий композитный цемент и завершите реставрацию обычным способом.



Лента в коронковой части должна быть закрыта со всех сторон реставрационным материалом слоем 1-2мм.