

- 1) Изготовьте модель из каменного гипса стандартным способом, который применяете при изготовлении съемного зубного протеза,.



- 2) Dentapreg® MESH выньте из пакета и согните его (если он покрыт пергаментной бумагой, прогладьте утюгом) в течение 5-10 секунд, сетка станет гибкой.



- 3) После разглаживания выньте сетку из пергаментной бумаги и немедленно адаптируете к модели из каменного гипса. Подождите, пока она не остынет и не сохранит требуемую форму.




- 4) Стандартными ножницами придайте ей необходимую форму.



*форма приспособленной сетки для нижней челюсти.




- 5) Нанесите слой массы из акриловой смолы на половинку миски с зубами.
6) Закройте модель из каменного гипса прилагаемой прозрачной пленкой.

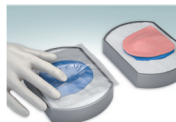


- 7) Закройте миску.

- 8) Миску вложите под пресс. Полностью не сжимайте, только на столько, чтобы выступившая избыточная акриловая масса имела толщину припл. 1-2 мм.

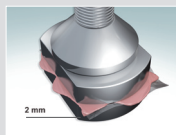


9) Извлеките миску из пресса, откройте ее и снимите пленку.

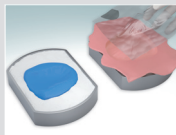


10) Модель из каменного гипса закройте тонким слоем акриловой массы.

11) В этот слой вложите адаптированную сетку Dentapreg® MESH. Убедитесь, что акриловая масса распространилась по всей нижней поверхности сетки.

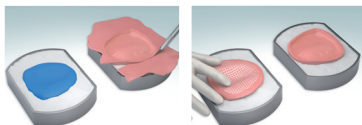


12) Закройте миску и вложите под пресс.

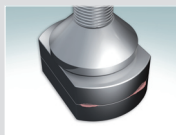

13) Произведите термоотверждение согласно инструкциями изготовителя материала.

14) Снимите зубной протез и завершите его стандартным способом.

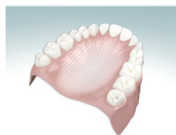

Состав

Dentapreg® MESH

Поли (бутил метилакрилат-ко-метил метакрилат)

Стекловолокно

Остальные ингредиенты: катализаторы, стабилизаторы и пигменты.

Противопоказания

Использование фиксации Dentapreg® противопоказано для пациентов с аллергией на один из компонентов продуктов Dentapreg®.

Рекомендации

При манипуляции с Dentapreg® MESH рекомендуем использовать неопудренные латексные или нитриловые перчатки.

Производитель

ADM, a.s., U Vodárny 2, Brno 616 00, Чешская республика, www.dentapreg.com

Внимание

Федеральный закон разрешает производить продажу данного оборудования только зубным докторам и лабораторным техникам или по их заказу.

Предупреждение

- Dentapreg® MESH должен быть полностью покрыт массой с акриловой смолой.
- Будьте осторожны при работе с утюгом, который имеет горячую поверхность.
- Не используйте Dentapreg®, если упаковка была повреждена.
- Не используйте Dentapreg® по истечении срока годности.

